

点検・修理報告書

管理 No. 20180331

発行日: 2018年 4月 13日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018年 4月 11日		作業時間: Hr
顧客名	あかまつ 歯科 クリニック	様	TEL:
所在地	神戸市垂水区舞鶴1-27-19		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014年 8月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14060091	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E7-30 缶体真空異常			
原因			
排蒸弁の汚れ 吸水電磁弁=7°のストレーナの汚れ			
処置、作業内容			
排蒸弁の清掃 吸水弁=7°ストレーナの清掃 真空弁=7°の清掃			
特記事項			
吸水タンクの清掃をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 4月 13日

ご署名 青松 佑紀 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

