

点検・修理報告書

管理 No. 20180928

発行日: 2018年 10月 5日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 9 月 24 日	作業時間: 6 Hr
顧客名	梅村歯科 様	TEL:
所在地	兵庫県神戸市東灘区御影中町2-2-2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100010	運転回数: 1178	タッチパネル Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー7 循環水圧低下			
原因			
循環ポンプインペラの破損			
処置、作業内容			
循環ポンプ交換			
各部、清掃点検			
特記事項			
洗浄槽内のフィルターの定期的な清掃をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 10 月 5 日

梅村歯科医院

ご署名 神戸市東灘区御影中町2-2-2

電話 (078) 851-7841

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
18/09/24	18/09/24