

《不具合対応報告書》

担当者: 小山 タカキ

改修完了機
返却

【発生日】 年 月 日

【対応日】 年 月 日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】 朝日ケル デジタルクリニック
朝 兵庫県

IC Washer【機番:100058】

IC Clave【機番: 】

【症状】

水漏れ
ワイヤーセパ
→ 改修完了
返却

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水&お湯

【ラック種類】 ☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

運転回数 568回

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

点検・修理報告書

管理 No. 20181031

発行日: 2018年 10月 31日

機種/型式	ICウォッシャー		
作業年月日	2018 年 10 月 31 日		作業時間: Hr
顧客名	朝日ヶ丘タカハシデンタルクリニック 様		TEL:
所在地	兵庫県芦屋市朝日ヶ丘28-25		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100058	運転回数: 568回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・扉が全開になる			
原因			
・扉のワイヤーが切れていた			
処置、作業内容			
・ワイヤーとプーリーを交換した(左右両方)			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ワイヤー		2		
2	プーリーL		1		
3	プーリーR		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

高橋 淳



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 朝日ヶ丘タカハシデンタルクリニック 御中 製造番号 100058

住所 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘28-25

点検日 2018年 10月 31日

点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 月 日

ご署名

高橋 淳



本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528