

点検・修理報告書

管理 No. 20181121

発行日: 2018 年 12 月 18 日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2018 年 11 月 30 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	せんざき歯科 様		TEL:
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100232	運転回数: 1311	タッチパネル Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー 1 機器内漏水			
原因			
循環ライン継手からの水漏れ			
処置、作業内容			
循環ライン継手交換			
特記事項			
洗浄槽内フィルターの定期的な清掃をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	2方チーゾジョイント		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	桐野