

点検・修理報告書

管理 No.

19024

発行日:

2019年 11月 6日

作業年月日		IC Clave 2019年11月6日		作業時間: 8 Hr	
顧客名	むらいデンタルクリニック 様			TEL:	078-753-8000
所在地	兵庫県神戸市垂水区桃山台4-2-1 垂水桃山台ビル101			ご担当	様
販売店	マルヤマ歯科商店			ご担当	和平 様
納入年月日	2019 年 5 月 9 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号:	100402	運転回数:	334回
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
運転時に下記エラーが表示されました				
・ 蒸気注入異常 (I7-16)				
・ 滅菌異常 (I7-18)				
原因				
・ 蒸気弁に異物が噛み込み、弁の開閉に負荷がかかった				
・ 圧力センサー部へ液体が流入して機能低下した				
処置、作業内容				
・ 蒸気弁、圧力センサーを交換				
・ 排水タンク、排水系配管の清掃				
・ 排水コネクタ交換				
特記事項				
今後66回運転しますとエアフィルター交換のお知らせ表示がありますので交換をお願いいたします (支給)				



交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気弁		1		
2 圧力センサ		1		
3 排水コネクタ		1		
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

むらいデンタルクリニック

ご署名 村井 哲朗



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/06	'19/11/06	'19/11/06