

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年11月1日

IC Washer	
作業年月日	2019年11月1日 作業時間: 1.0 Hr
顧客名	あほ歯科様
所在地	TEL:
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100218	運転回数: 978	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドア開放異常			
原因			
ドア閉時 OMSリミットスイッチ変形 ドア閉時、強い力、早いスピードで閉た事によりスイッチ変形してありました。			
処置、作業内容			
リミットスイッチ変形修正、変形を防ぐ補助スチーを 取付してあります。			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	補助スチー			無償	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

桐澤