

点検・修理報告書

管理 No. 19009
発行日: 2019年 10月 23日

IC Clave	
作業年月日	2019 年 10 月 18 日 作業時間: 10 Hr
顧客名	せんざき歯科医院 様 TEL:
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100374	運転回数: 1275回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転開始約5分後に電源が落ちた。		
原因		
・お客様の配電盤の漏電ブレーカが落ちていました。		
・缶体ヒータの絶縁不良が原因でした。		
・缶体ヒータの電線引き出し口の付け根の絶縁被覆が薄くなっておりました。		
処置、作業内容		
・缶体ヒータは4個使用しておりますが、問題のあったヒータを新品と交換させていただきました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体ヒータ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒678-0224 兵庫県赤穂市元沖町10番地

せんざき歯科医院

TEL: 0791-43-6480 FAX: 0791-43-6485

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/10/23	'19/10/23	'19/10/23