

# 点検・修理報告書

管理 No. 19144  
発行日: 2020年2月6日

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                | 2020年1月23日 作業時間: 8 Hr                                                                                                             |
| 顧客名                  | 田中歯科クリニック 様                                                                                                                       |
| 所在地                  | 兵庫県西宮市甲子園口2-3-3 パルメーラ甲子園口1F                                                                                                       |
| 販売店                  | ご担当 様                                                                                                                             |
| 納入年月日                | 年 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                              |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                           |              |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                      | 製造番号: 100137 | 運転回数: 1642回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                           |              |             |
| ・エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。              |              |             |
| 原因                                        |              |             |
| ・蒸気発生器用ヒータが断線しておりました。                     |              |             |
| 処置、作業内容                                   |              |             |
| ・蒸気発生器用ヒータを新品交換いたしました。                    |              |             |
| 特記事項                                      |              |             |
| ・シャトルバルブと圧力センサの汚れがひどい状態でしたので、新品交換しておきました。 |              |             |

|   | 交換部品名称    | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|-----------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 蒸気発生器用ヒータ |             | 1      |    |    |
| 2 | シャトルバルブ   |             | 1      |    |    |
| 3 | 圧力センサ     |             | 1      |    |    |
| 4 |           |             |        |    |    |
| 5 |           |             |        |    |    |
| 6 |           |             |        |    |    |
| 7 |           |             |        |    |    |
|   |           | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |           |             | 技 術 料  |    |    |
|   |           |             | 出 張 料  |    |    |
|   |           |             | 合 計    |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田中歯科クリニック 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 品証        | 責任技術者     | 作業者       |
|-----------|-----------|-----------|
| 菊池        | 富田        | 三宅        |
| '20/02/03 | '20/02/03 | '20/02/03 |