

点検・修理報告書

管理 No. 20317
発行日: 2021年2月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/2/9		作業時間: 8 Hr
顧客名	ハナブサ歯科 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100263	運転回数: 1337回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・エラー26 停電異常が発生した。 お客様の漏電ブレーカが落ちた。	
原因	
・蒸気ヒータが絶縁不良状態で、漏電しておりました。 給水タンク 蒸気ヒーター ・使用されている水の水質が悪く、ヒータ表面にミネラル（カルシウム、マグネシウムなど）と思われる物質が大量に付着しておりました。これにより、蒸気ヒータの熱伝達に異常をきたし、絶縁破壊したと考えられます。	

処置、作業内容
・蒸気ヒータを新品交換しました。
・給水タンクが汚染されておりましたので、清掃いたしました。
特記事項
・必ず精製水をご使用いただきますようお願いいたします。
・真空弁にうなり音がありましたので、交換いたしました。
・最新の状態にバージョンアップいたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒータ		1		
2	真空弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄	2021年 2月 19日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		