

点検・修理報告書

管理 No. 20100
発行日: 2020/12/25

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020年12月18日	作業時間: 8 Hr
顧客名	せんざき歯科 様	TEL:
所在地		ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100232	運転回数:
------	--------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・ドア下より水が漏れた。

原因

・工場でも繰り返し何度も運転しましたが、再現いたしませんでした。

・お客様で水漏れが発生した原因としては以下の要因が考えられます。

ドアパッキンに異物がはさまっていた。

ドアの締め付け強さがやや弱い設定だったこと。

処置、作業内容

・ドアロック機構を調整し、ドアを閉めてロックしたときのパッキンを押しつぶす力を強く致しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	カム 1		1		
2	カム 2		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 12月 25日

ご署名

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者