

点検・修理報告書

管理 No. 210179
発行日: 2021年8月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月29日 作業時間: 8 Hr
顧客名	いなだ歯科クリニック 様 TEL: 0791-72-7222
所在地	兵庫県たつの市揖保川町新在家207-15 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 2 月 14 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100308	運転回数: 4174回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー20 吸気異常が発生した。		
原因		
・圧力センサに蒸気が侵入し、圧力値にずれが生じ、乾燥終了準備中に圧力が大気圧に戻らず、エラー20が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・配管チューブ内に残留した水を除去しました。		
・圧力センサを交換いたしました。		
特記事項		
・缶体ヒーター4個のうち1個が故障していたので、交換しました。		
・蒸気弁に作動不良がありましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	缶体ヒーター		1		
3	蒸気弁		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 5 日

ご署名 30 愛莉 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中村
21/08/03	21/08/03	21/08/03