

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

令年 9月29日

お客様	名称 橋本歯科医院	機種 橋本歯科医院	製造番号 14060095	点検実施日 2021年9月17日	ご承認印
	住所 兵庫県姫路市豊富町甲丘3-8	運転回数 1082/1000	点検実施者 IHI物流産業システム サービスG 安田		
	納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ設備部署 モリタ 神戸営業所		

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 閉閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 殺菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 殺菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

-
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・給水タンクホルダー	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

点検・修理報告書

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 9 月 16 日	作業時間 :	Hr
顧客名	橋本歯科医院	様	TEL : 079-264-1758
所在地	兵庫県姫路市豊富町甲丘 3-8	ご担当	様
販売店	大河歯科材料店	ご担当	様
納入年月日	2014 年 9 月 4 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号 :	14060095	運転回数 :	1082	
------	--------	----------	--------	------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴
エラー 10・エラー 31
缶内低温異常・缶内加圧異常

原因	・給水タンクに異物が溜まり水の供給ができなくなり異常が発生 ・真空ポンプもゴミ等が入り性能低下

処置、作業内容
・給排水タンク清掃 給水タンクホルダー交換
・真空ポンプ交換

特記事項
・定期点検一式

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水タンクホルダー		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄	3 年 9 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

ご署名

橋本芳紀



修理業者	株式会社 IHI物流産業システム	品証	責任技術者	作業者
	岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	菊 '21/09/21 池	富 '21/09/17 田	安 '21/09/16 田