

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

# クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

|     |    |            |         |            |                                                                              |
|-----|----|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称 | 須藤歯科診療所 様  | 製造番号    | 100300     | ご確認<br>法人 須藤歯科診療所<br>岡山市児島唐琴3丁目5番11号<br>TEL (086) 477-8746 FAX (086) 477-814 |
|     | 住所 | 岡山県倉敷市児島唐琴 | 納入検査実施日 | 2017.10.18 |                                                                              |
|     |    | 3-5-11     | 納入検査実施者 | 若井 中村      |                                                                              |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目    | 判定 | 検査項目                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------|
| ドア・パッキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ      |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認        |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態            |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性           |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              | 外装・設置 | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ     |
|         | ✓  | 棚、トレイのキズ・汚れ                                                 |       | ✓  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。  |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  | 制御    | ✓  | キズ・汚れ                  |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷      |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか                           |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)  |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認       |
| 排水タンク   | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施 (デンタルモード)     |
|         | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 |       | ✓  | リークチェックテスト             |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |       | ✓  | 0点調整                   |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付    |
| スペース    | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと | その他   | ✓  | 運転・お手入れ方法の説明           |
|         |    |                                                             |       | ✓  | 装置内運転時異音               |

|      |
|------|
| 特記事項 |
|      |
|      |
|      |
|      |

