

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIAグリテック用

名前	かどや歯科医院	機種番号	14090201	点検実施日	2018年7月10日	ご承認印
住所	岡山県岡山市東区政連743-1	通電回数	1477	直検直対者	エムシーサービス岡山支店	

計数(安全)

- 圧力計0点表示誤差
- ドア
- フック突出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 閉閉ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック端番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーローセット等し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 銀板のキズ・汚れ
- 閉閉ハンドルの損傷確認
- 佐体
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 緊急温度センサの汚れ
- 置きカゴの破損・汚れ
- 伝内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- フッソ樹脂チューブ・握手の損傷・汚れ
- シリコンチューブ・握手の損傷・汚れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排泄弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 絶縁弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減圧弁)の漏れ
- 安全弁(離気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・連接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ
- 蒸気発生器
- ソケット電源接続割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空気き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ
- 真空ポンプ
- 水漏れ・異常音の検証
- 真空測定度
- 給水タンク
- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 罫・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ
- 排水タンク
- タンクの漏れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター・端子確認
- 墓石の端子・コネクターの接続確認
- 記録の変色・損傷有無・経年状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター記録の端子・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・位置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

- 消耗品
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

- 性能評価
- B&Dテスト実施
- ケマルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認	
◎	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-844-6528

FAX:086-842-9030