

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日： 年 月 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	年 月 日	作業時間：	Hr
顧客名	グランデンタルクリニック 様	TEL：	
所在地	岡山県岡山市北区表町1-9-6 4	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	


装置情報	製造番号： 13100042	運転回数： 5786
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 9

洗剤供給異常

原因

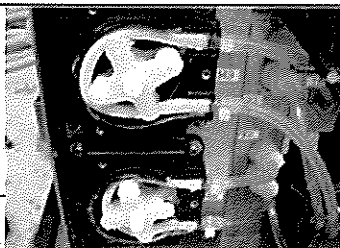


洗剤供給ポンプのチューブが硬化してポンプは、廻っていても仕上り剤が供給されない。

・フロートセンサー破損

以上の原因で異常が発生したと考えられます。

処置、作業内容

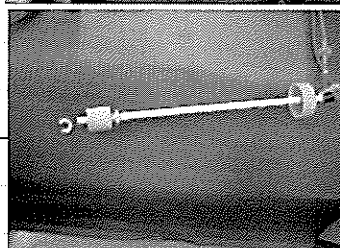

・ポンプチューブ交換で仕上り剤の修理

・洗剤・仕上り剤フロートセンサー交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤フロートセンサー		一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/04/12 富田	環境PJサービス '19/04/11 安田