

点検・修理報告書

管理 No. 100129
発行日: 2020年4月1日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/3/16 作業時間: 8 Hr
顧客名	倉敷リバーサイド病院 様 TEL: 086-448-1111
所在地	岡山県倉敷市鶴の裏2-6-11 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100129	運転回数: 1926回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・滅菌運転終了後にドアを開けようとするが、何かが引っかかって開かない。		
少し時間をおいてからハンドルの開閉を繰り返すと開いた。		
原因		
・ロックピンがハンドルのシャフトに引っかかったためにドアが開かなかったと考えられます。		
ロックピンは缶内の圧力が上がると安全のためにドアをロックするためのピンです。		
ピンの滑りがよくない状態でした。(経年劣化によりグリスが減っておりました。)		
処置、作業内容		
・グリスを塗り、ピンの滑りを改善しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 4月 2日
ご署名 後藤 一樹 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/04/01	20/03/17	20/03/17