

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 須藤歯科診療所	製造番号 100300	点検 実施日 2021/1/13	ご承認印	
	住所 倉敷市児島唐琴3-5-11	運転回数 回	点検 実施者 (株)IHIアグリテック		
	納入場所	サービス形態	モリタ 担当者		

計装(安全)



圧力計0点指示誤差

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認



フック取付け状態・動作確認



フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態



ビス・ナット・ホーローセット増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット動作確認



ドアロックユニット動作確認



蓋板のキズ・汚れ



缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無



減菌温度センサの汚れ



トレー棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ



缶内ストレーナーの損傷・汚れ



配管系



フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ



シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ



給気弁の作動状態・漏れ



排蒸弁の作動状態・漏れ



真空・乾燥弁の作動状態・漏れ



減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ストレーナーの汚れ



排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損



安全弁(減菌室)の漏れ



安全弁(蒸気発生器)の漏れ

ダンブナーの漏れ・溶接割れ

大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ

ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器



ソケット他溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ



逆支弁の作動状態・漏れ



真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度



給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ



下部給水弁の漏れ

蓋・取っ手の損傷・割れ

フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

タンクの汚れ・漏れ

フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系



タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電源スイッチの作動状態



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター緩み確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置



本体の水平確認・基準傾き内



アジャスタフットの緩み・設置状態



キズ・汚れ



制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷



運転プログラムの確認



入力・出力確認



消耗品



ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ



エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価



B&Dテスト実施



ケミカルインジケータによる判定



リークチェック



キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認

合

否

インジケータ貼り付け

【

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1
プログラムバージョンUP	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030