

# 点検・修理報告書

管理 No. 210330  
発行日：2021 年 8 月 27 日

|       |                                                                                                                                   |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機種/型式 | WD-150                                                                                                                            |                                                                       |                   |
| 作業年月日 | 2021 年 8 月 18 日                                                                                                                   |                                                                       | 作業時間： 4 Hr        |
| 顧客名   | グランデンタルクリニック 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL： 086-234-5067 |
| 所在地   | 岡山県岡山市北区表町1-9-64                                                                                                                  |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   |                                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2014 年 4 月 3 日                                                                                                                    | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                    |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |                   |

|                  |                |            |
|------------------|----------------|------------|
| 装置情報             | 製造番号： 13100042 | 運転回数： 8594 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴  |                |            |
| ・エラー7 給水量不足      |                |            |
| 原因               |                |            |
| ・給湯側の流量計の破損による故障 |                |            |
| 処置、作業内容          |                |            |
| ・給湯側の流量計の交換      |                |            |
| ・定期メンテナンスの実施     |                |            |
| 特記事項             |                |            |

|   | 交換部品名称   | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計           |
|---|----------|-------------|--------|----|--------------|
| 1 | 流量計（給湯側） |             | 1 個    |    |              |
| 2 | 定期交換部品   |             | 1 式    |    |              |
| 3 |          |             |        |    |              |
| 4 |          |             |        |    |              |
| 5 |          |             |        |    |              |
| 6 |          |             |        |    |              |
| 7 |          |             |        |    |              |
|   |          | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |              |
|   |          |             | 技 術 料  |    |              |
|   |          |             | 出 張 料  |    |              |
|   |          |             | 合 計    |    | ※定期メンテナンスに含む |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

*清水 裕也*

印

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                    | 責任技術者               | 作業者                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 品証<br>'21/08/23<br>菊池 | 富<br>'21/08/20<br>田 | 安<br>'21/08/19<br>田 |

## 器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

年 月 日

|     |                |                  |          |           |            |      |                                                                                     |
|-----|----------------|------------------|----------|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | グランデンタルクリニック 様 | 製造番号             | 13100042 | 点検実施日     | 2021年8月19日 | ご承認印 |  |
|     | 住所             | 岡山県岡山市北区表町1-9-64 | 運転回数     | 1425/8594 | 点検実施者      |      |                                                                                     |
|     | 納入場所           |                  | サービス形態   | 定期保守点検    | モリタ担当部署    |      |                                                                                     |
|     |                |                  |          |           | モリタ 岡山営業所  |      |                                                                                     |

## ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

## 洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

## 乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

## 配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

## ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

## 洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

## 外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 消耗品


- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

## 性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



洗浄前

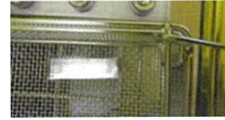

洗浄後

|      |   |
|------|---|
| 運転確認 |   |
| 合    | 否 |

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品 (名称・型式)       | 数量 |
|--------------------|----|
| ・ドアパッキン            | 1式 |
| ・HEPAフィルター         | 1式 |
| ・プレフィルター           | 1式 |
| ・洗剤ポンプチューブ(洗剤・仕上剤) | 1式 |
| ・流量計(給湯)           | 1個 |
|                    |    |
|                    |    |
|                    |    |
|                    |    |
|                    |    |

株式会社IHI物流産業システム  
 環境ソリューションBU サービスグループ  
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL:086-944-6528  
 FAX:086-942-9030