

# 点検・修理報告書

管理 No. 210364

発行日: 2021年9月15日

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC Clave |                                                                                                                                   |
| 作業年月日    | 2021年9月3日 作業時間: 8 Hr                                                                                                              |
| 顧客名      | ひさとみ歯科医院 様 TEL: 0869-26-6858                                                                                                      |
| 所在地      | 岡山県瀬戸内市長船町土師313-1 ご担当 様                                                                                                           |
| 販売店      | ご担当 様                                                                                                                             |
| 納入年月日    | 2021 年 4 月 7 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                          |
| 作業区分     | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取    | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                                                                           | 製造番号: 300162 | 運転回数: 306回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                                |              |            |
| 1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。                                                                        |              |            |
| 2. 運転終了後に水がたまる。                                                                                |              |            |
| 3. 機器の下が水浸しになる。                                                                                |              |            |
| 原因                                                                                             |              |            |
| 1. ドアパッキンのシール不良が原因でリークしておりました。そのために、エラー12が発生したと考えられます。<br>シール不良の原因は、ドアパッキンの劣化とドア固さ調整が緩かったためです。 |              |            |
| 2. 上記と同じ原因で乾燥が悪くなったために、水が残ったと考えられます。                                                           |              |            |
| 3. 上記と同じ原因でパッキンの隙間から水がこぼれたと考えられます。                                                             |              |            |
| 処置、作業内容                                                                                        |              |            |
| ・ドアパッキンを交換しました。                                                                                |              |            |
| ・ドアの固さ調整をいたしました。                                                                               |              |            |
| 特記事項                                                                                           |              |            |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 | ドアパッキン |             | 1      |    |    |
| 2 |        |             |        |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技術料    |    |    |
|   |        |             | 出張料    |    |    |
|   |        |             | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 21 日

ご署名 ひさとみ歯科クリニック 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証       | 責任技術者    | 作業者      |
|----------|----------|----------|
| 菊池       | 小山       | 三宅       |
| 21/09/15 | 21/09/15 | 21/09/15 |