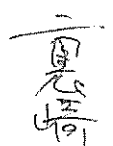


クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	うらさき歯科 様	製造番号	13100054	点検実施日	2015/8/27	承認印	
	住所	広島県三原市明神 2-11-10	運転時間	60分 10時間	点検実施者	小野		
	納入場所		サービス形態	定期1	モリタ担当部署	広島		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット動作確認
 - ☒ ドアロックユニット動作確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認	
合格	
交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1年目はない。
エアーフィルター	



株式会社HISHIHARA

機械事業本部営業部 / 営業サービスG
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6628 FAX 086-942-9030

管理No. 20150817-0

作業日 2015 年 8 月 27 日

作業報告書 ①



株式会社IHIシバウラ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6510 FAX 086-944-9030

顧客名

うらさき歯科 様

ご住所

広島県三原市明神町2-11-10

TEL (0848) 64-0422

機種
型式

BC-17

機番

13100054

運転
状態

509

修理
区分

有償

無償

継続

症状

エラー31 (缶内加圧異常)

異常発生時にタンクに水が無かった。

その後、水を入れたら正常に動いた。

原因

SV5電磁弁不具合により、タンクの水が、

過剰になくなりエラー31が発生。

*バッキュム運転時に多くの水が流れる。

交換部品名称

数量

SV5電磁弁

1

処置

SV5の部品交換

本日は、左記内容の作業を行いました。
よろしく、ご査収下さい。
ご不明な点がございましたら、
左上の管理No.にてお問い合わせください。

後日、納品書・請求書を、送付いたします。

最終確認項目

B & Dテスト実施により水の減り状況の確認

行い。問題ないことを確認しました。

コメント

工番49992

無償対応

お客様ご署名

実施者

小野

① お客様控え