

訪問報告書（訪問修理）				修理依頼番号		No.
支店名	株式会社 モリタ広島 殿			機種	WD-150	
所在地	広島県尾道市西則末町 8-20			機番	14080155 (旧 14060074)	
ユーザー名	河上歯科医院 様			納入日	平成 26 年 7 月 21 日	
点検者	小野定之	作業時間	H r	受付日	平成 27 年 7 月 17 日	
				訪問日	平成 27 年 8 月 4 日	
故障状況						
7月15日 エラー10発生 凝縮タンク満水 ・庫内フィルターを清掃し改善（？） ・電源 OFF & ON にて復旧 その後使用可能 BC・WD の定期点検にあわせてチェックを希望						
訪問処置（流れ）						
履歴確認；20回運転中 2回発生（不定期） 不具合原因；凝縮タンクオーバーフローセンサーご感知 処置； 不具合原因の凝縮タンクオーバーフローセンサーの交換 交換部品 						
*WD-150 定期1年目訪問時に実施処置 以上						

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	河上歯科医院 様	製造番号	14080155	点検実施日	2015/8/4	ご承認印	
	住所	広島県尾道市西則末町 8-20	運転時間	496 時間	点検実施者	小野		
	納入場所		サービス形態	定期1	モリタ担当部署	広島		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品


- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



検査前

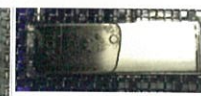

検査後

運転確認

合格

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプ	2
オ-リング・ベアリング (2ヶ所)	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業部
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

[BC-17、WD-150点検・出張修理依頼票兼発注書] (受付票) FAX

株式会社モリタ
担当者 金藤
TEL 082-291-3531
FAX 082-292-7109

保守点検依頼
修理依頼
TEL 依頼 分

保守点検依頼
修理依頼
TEL 依頼 分

保守点検依頼
修理依頼
TEL 依頼 分

次の通り、訪問します

受付No	訪問予定日	受付担当者
	月 日 AM/ PM	

修理結果を下記の通り、(完了・中間)報告します

訪問日	8月24日	担当者	山崎
報告内容			
☐ 部品交換の上、完了いたしました。			
☐ 各部調整により、完了いたしました。			
☐ 持ち帰り修理(月 日完了予定です)			
☐ 部品待ちの為 月 日に再訪問予定です。			
☐ 見積連絡待ちの為、保留中です。			

修理業者様へ
・ポイントの結果をこの修理依頼票に記載しモリタ拠点にFAXする。
・出張修理完了後(翌日まで)、修理結果をこの修理依頼票に記載し、モリタ拠点宛に必ずFAXする。

訪問 8月24日 18:00~22:30 定時
BC-17 欠

下記の通り、出張修理を依頼します。

依頼日	27年 7月 17日	依頼No		担当者	
医院名	河上歯科医院 様				
ご住所	〒722-0024 広島県尾道市西則末町8-20 TEL 0848-22-2882				
製品名	ウォッシャー ディスプレイエクター	形式	WD-150	Ser No	?
販売店	徳玉井歯科商店 福山店		設置日	27年 月 日	
故障状況	7月15日 エラー10→庫内フィルターを清掃して改善(?) 7月16日 乾燥工程終了後の表示パネルが「MORITA WD-150」で赤色表示 庫内も赤色LED点灯 電源OFF&ONIにて復旧 その後使用可能 BCの定期点検に合わせてチェックを希望				
訪問希望日	7月 21日以降の昼休み	契約種類	Wベージック	保証期間	内 外)
備考	(IHシバウラコメント)				
保守点検の場合:部品交換(有・無)					
昼休み 12:30 ~ 14:30					