

修理報告書（出張修理）

修理依頼
番号

No. 20151116

納入先	株式会社 モリタ 広島支店 様			機種	WD-150
顧客名	みやじ歯科医院 様			機番	14060103
所在地	広島県庄原市東城町1134			納入日	平成27年6月22日
点検者	中澤 一裕	作業時間	2.5Hr	受付日	平成27年11月16日
返送先				作業日	平成27年11月16日

修理依頼・不具合内容

エラー8（循環水圧低下）
開始してすぐエラー発生。清掃してスタートを3回繰り返したが改善せず。
フィルターに黒いゴミが付着している。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

循環ポンプ（M1）が故障して水圧が下がり、これを圧力センサーが検知してエラー8が発生しました。

運転（工程）回数：288、 定期メンテナンス：288
使用洗剤：アイエスザイム、仕上げ剤：アイエスミルク（仕上剤量30ml、投入時間120秒）

[2] 修理・点検内容

循環ポンプを点検したところ、インペラー（写真1の矢印）が固着して回転しない状態でした。
このポンプを交換して復旧しました。
なぜ早期に故障したのか、引き続き調査・検討いたします。

写真1：循環ポンプ前面



写真2：循環ポンプ 上面



承認



審査



作成

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
002-0226-0	循環ポンプ（M1）	1	

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528