

お 客 様	名称	マツダ病院	製造番号	14070130	点検実施日	2018年8月29日	こ 承 認 印	15 15
	住所	広島県安芸郡府中町青崎南2-15	運転回数	2069	点検実施者	エムシーサービス㈱西村		
	納入場所	歯科口腔外科	サービス形態	定期保守点検	モリタ担当	広島支店		

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

街体

✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
✓	滅菌温度センサの汚れ
✓	網カゴの破損、汚れ
✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✓ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✓ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジ/パッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	行程表示LEDの点灯
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクター緩み確認
✓	端子の緩み・コネクターの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

・装・設置

✓	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認
☒ 入力・出力確認
☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒ エアフィルターのかぶり、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

☒ 合 . 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1
エアフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030