

C 作業報告書

依頼様	こやま歯科医院		様	ご承認印	
住所	山口県周南市徳山上御町4781				
TEL	0834-22-6622	署名			
機種名	ワッシャー・ディスプレイ	メーカー	エムタ (JHLパナソニック)		
型式	IC Washer	号機		製番	100319
完了	継続	有料	無料	初回回数	11 回

ご依頼内容・現象

- ① 工程は特定されないが、洗浄槽汚水(エ-2)発生。
 ② 槽内洗浄行程で給水時間超過(エ-6)発生。
 (ご依頼者 様)

原因

- ① 排水回路(排水ホース)の長さによる排水抵抗が大きかったため、排水時に槽内の水を抜ききれなかったと考えられます。
 ② 給水圧力が高いため、電磁弁が作動しきれなかった可能性があります。

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- ① 排水ホース取外し、排水ホース長さを半分に。
 再セット後、93%の排水能力チェック。→ OK。
 ② 給水圧力チェック。→ 高い時で、0.6MPa程度。
 万が一再発した時を想定し、(他の病院でも電磁弁作動不良が発生する圧力です。) 圧力解放用の回路を取付け。

③ 給水量・カウントチェック。→ OK。(給湯も)
 90℃×5分・乾燥仕上割ありプログラム実施にて動作・漏れチェック

- ④ 後日、給水回路に減圧弁を取付け、0.3MPa程度に減圧させて頂きます。

作業日 20 18 年 12 月 27 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検整備	6 点検整備	7 点検整備	8 点検整備	9 点検整備
サービス形態	1 保守期間	2 保守内容	3 CM	医療機器	3	区分	特	非	特
作業区分	00 製品不良	10 納入設置	11 現地調整	20 点検整備	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 搬送移動	70 PR
	72 取扱説明	73 改造	74 35品納入	75 下見	77 FC	80 アプ	90 点検		

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水ホースコネクタ	1		
	(給水圧力解放用)	(1)		
	回路一式			

1	基本・機付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料 往復300km	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サービス担当者	北九州SC	実施者	久岡
TEL	080-491-5218		

取扱業務 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

北九州SC 福岡SC 山口SC 徳山SC 小倉SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC 那覇SC
 北九州SC 福岡SC 山口SC 徳山SC 小倉SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC 那覇SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・搬送テスト

滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

管理№ 813306

左記作業をおこないましたので、ご
 検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
 上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

※ 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

材料費等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書№

C 実施者 → 営業