

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

| | | | | | | |
|-----|------|-------------------|--------|----------|---------|-----|
| お客様 | 名称 | 木村歯科 | 製造番号 | 13100050 | 点検実施日 | 承認印 |
| | 住所 | 広島県広島市南区字品西5-11-1 | 運転回数 | 2595 | 点検実施者 | |
| | 納入場所 | 同上 | サービス形態 | | モリタ担当部署 | |

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
 - フック取り付け状態・動作確認
 - フックパネ・フック線番ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット動作確認
 - ドアロックユニット動作確認
 - 蓋板のキズ・汚れ
 - 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 滅菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック

インジケータ貼り付け



| | |
|------|---|
| 運転確認 | |
| 合 | 否 |

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品 (名称・型式) | 数量 |
|--------------|----|
| ドアパッキン | 1 |
| ドアレバー | 1 |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030