

点検・修理報告書

管理 No. 2019. 02. 07

発行日: 2019年 02月 07日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 2 月 7 日 作業時間: 2 Hr
顧客名	みどり歯科 TEL: 082-233-1418
所在地	広島県広島市西区南観音2-5-41 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100184	運転回数: 850	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー1 機械本体漏水			
原因			
① 乾燥ライン樹脂継手亀裂			
処置、作業内容			
① 樹脂継手交換			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります			
ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者



作業者

