

点検・修理報告書

管理 No. 20191015

発行日: 2019 年 7 月 18 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 7 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	うらさき歯科 様	TEL:	
所在地	広島県三原市明神2-11-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 7 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060073	運転回数: 1419
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転中に臭いがする ・ドア開放異常が発生する		
原因		
・排水センサブロックより水が漏れ装置内に水が溜まり、臭いが発生していました。 ・ドアロック機構にホコリがたまり、ロック機構が上手く作動しなかったため ドア開放異常が発生していました。		
処置、作業内容		
・装置内部に溜まった水の除去と清掃 ・ドアロック機構の清掃及び動きの確認		
特記事項		
・保守点検より直後の為、無償にて対応致します。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

うらさき歯科 様
 裏崎 英之
 〒731-0244 広島県三原市明神2丁目11番10号
 ご署名 TEL (0848) 64-0422 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者

環サ '19/07/18 富田	環サ '19/07/18 安田
-----------------------	-----------------------