

# 《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 5 月 11 日  
 【対応日】 2019 年 5 月 11 日  
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者: )  
☐ユーザー  
☒その他(東歯科商店)石井 様  
 【ユーザー名&県名】 大倉 歯科 (広島)

wp-150

IC Washer【機番:13100044】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー 8 洗浄水圧低下

【対応方法】☐引取り修理(代替機no. )

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換( )  
☐その他( )

→ 部品交換ナシ。 費用 ⇒ 石井さんと相談する。

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

循環ポンプが動いていない

循環ポンプ内に「バー」が挟み込まれていた。

フィルターが汚れている事が原因と思われる。

新品のフィルターを購入してもらうようお願いした。

前回のメンテナンスが2018.5.28なので、定期メンテナンスを

受けてもらうようお願いした。

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no. )

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換( )  
☐その他( )

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他( )

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】