

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ
作業員
田中アグリテック用

お客様 お名様	名称 中西歯科医院	製造番号 14080100	点検 実施日 2019年7月5日	承認 印 中西
	住所 広島県広島市南区比治山本町16-35-12F	運送番 1845	点検 実施者 エムシーサービス網西村	
	納入場所	サービス形態	モリタ 販売部署 広島支店	

ドア機構

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバックシン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・濡れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・濡れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・濡れ
- ☒ RO水弁の作動状態・濡れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・濡れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- ☒ 凝縮水の取り付け状態・濡れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ クラック検出ゴムパッキンのヘタリ・濡れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の黄変・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加熱・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- ☒ 消耗品
- ☒ ドアバックシンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運送確認

☒ 有 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
DPIチューブASSY	2
ドアバックシン上	1
ドアバックシン下	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9080

B 作業報告書

依頼者	中西産科医院		様	ご承認印
住所	広島市南区比治山16-35-12F 中西			
TEL	082-251-6480	室名		
機種名	マシナ-デジイン79-	メーカー	モリタ	
型式	WD-150	(号機)	製造番号	14060100
毛	継続	有	無料	1845 回

ご依頼内容・現象

定期点検

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増補め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

定期点検及び定期交換

部品の交換作業。

試運転。

お客様への伝言

作業日 20 19 年 07 月 05 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検点検	4 点検整備	5 点検	☒ 対象外 (換装)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 部品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取説説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	API 部品	2		
	ドアロック	1		
	下	1		
	HEPA フィルター	1		
	入口 フィルター	1		

1	基本・搬付・点検・性能	(見積書No)	
2	技術料	日× 名× 円	
3	運送料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サインイン

岡山 実施者 西村

TEL

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No)

管理No 815624

左記作業をおこないましたので、ご検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

広島SC 長門SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
 岡山SC 徳島SC 千葉SC 新潟SC 東京SC 広島SC
 山口SC 高松SC 名古屋SC 愛知SC 北九州SC

茨城・減価償却委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

増設用典レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

T 087-0013 長門県下関市小島3171-6

TEL 022-273-0720 FAX 022-273-4074

T 386-0002 長門県下関市住吉280-8

TEL 0224-27-8280 FAX 0224-27-2250

T 387-0013 長門県下関市小島3172

TEL 022-273-4115 FAX 022-273-4116

料金内訳

⑨ A

部品代

⑩ B

技術料等

⑪

⑫

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書No

B 実施者→取扱業者