

点検・修理報告書

管理 No. 19114
発行日： 2020 年 5 月 8 日

機種/型式	BC-17				
作業年月日	2020 年 4 月 28 日			作業時間： 16 Hr	
顧客名	マツダ株式会社 マツダ病院 様			TEL：	
所在地	広島県安芸郡府中町青崎南2-15			ご担当 様	
販売店				ご担当 様	
納入年月日	2015 年 3 月 13 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号： 14070130	運転回数： 3071回			
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー30 缶体真空異常が発生した。					
原因					
・ドアパッキンがかなり劣化しておりました。					
・ドアハンドルが少し軟らかい状態でした。					
処置、作業内容					
・ドアパッキンを新品交換しました。					
・ドアハンドルを再調整しました。					
特記事項					
・給水ポンプの音が大きかったので、交換いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	給水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄					
2020 年 5 月 14 日 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 広島県安芸郡府中町青崎南2-15号 署名 マツダ株式会社 マツダ病院					

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
20/05/08	20/05/08	20/05/08