

株式会社IHIアグリテック  
 環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |    |                                  |          |                |            |  |     |      |
|-----|----|----------------------------------|----------|----------------|------------|--|-----|------|
| お客様 | 名称 | 岡崎歯科口腔外科 様                       |          | 製造番号           | 100430     |  | ご確認 | シバウラ |
|     | 住所 | 広島県広島市南区段原日出1-15-13<br>田外科内科ビル3F |          | 納入日            | 2020年3月16日 |  |     |      |
|     |    |                                  | 納入検査 実施者 | エムシーサービス 西村・松田 |            |  |     |      |

| 項目    | 判定 | 検査項目                               | 項目    | 判定     | 検査項目                                   |    |
|-------|----|------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|----|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                             | 外装・設置 | ✓      | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                     |    |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                      |       | ✓      | アジャスタフットの緩み・設置状態                       |    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                      |       | ✓      | キズ・汚れ                                  |    |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                    |       | ✓      | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                     |    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態                   | スペース  | ✓      | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと    |    |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                    | 制御    | ✓      | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認       |    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ             |       | ✓      | タッチパネル表示確認・履歴の確認                       |    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                           |       | ✓      | ラック仕様切換(ハント・ヒースラック・標準ラック)              |    |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                       |       | 有・無    | 温水使用切換                                 |    |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ                   | 評価機能  | ✓      | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                   |    |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)      |       | ✓      | 周波数と設置ICWの一致                           |    |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)        |       | ✓      | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                    |    |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)          |       |        | 運転・お手入れ方法の説明                           |    |
|       | ✓  | 給湯温度(45～50℃)                       | その他   | ✓      | 装置内運転時異音・振動                            |    |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                  |       | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 | トシ |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                    |       |        | <input type="checkbox"/> 不良            |    |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                        |       |        |                                        |    |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                       |       |        |                                        |    |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと<br>(漏電・熱注意) |       |        |                                        |    |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                 |       |        |                                        |    |

特記事項

2/10 ✓

## 株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

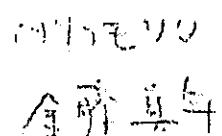
岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL 086-944-8528

FAX 086-942-9030

## クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

|     |    |                                   |                 |            |     |                                                                                     |
|-----|----|-----------------------------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称 | 岡崎歯科口腔外科 様                        | 製造番号            | 100478     | ご確認 |  |
|     | 住所 | 広島県広島市南区段原日出1-15-13<br>山田外科内科ビル3F | 納入検査実施日         | 2020年3月16日 |     |                                                                                     |
|     |    | 納入検査実施者                           | エムシーサービス㈱ 西村・松田 |            |     |                                                                                     |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目    | 判定 | 検査項目                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------|
| ドア・パッキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ      |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認        |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態            |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性           |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              |       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ     |
|         | ✓  | 棚、トレイのキズ・汚れ                                                 | 外装・設置 | ✓  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。  |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  |       | ✓  | キズ・汚れ                  |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           | 制御    | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷      |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない<br>蓋の取付取外しに問題が無いか                       |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)  |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水<br>コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                    | 性能評価  | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認       |
| 排水タンク   | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      |       | ✓  | B&Dテスト実施               |
|         | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 | その他   | ✓  | リークチェックテスト             |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |       | ✓  | 0点調整                   |
| スペース    | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水<br>コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                    |       | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付    |
|         | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |       | ✓  | 運転・お手入れ方法の説明           |
| 特記事項    |    |                                                             |       | ✓  | 装置内運転時異音               |

209 V