

点検・修理報告書

管理 No. 20563
発行日: 2020年11月16日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年11月9日 作業時間: 8 Hr
顧客名	アリス歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300042	運転回数: 31回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 缶体温度センサ故障（黄色表示画面）が出て、運転できない。 ・ 水の使用量が多い。		
原因		
・ 缶体温度センサが断線故障しておりました。 ・ 水の使用は正常です。標準的な使用量です。		
処置、作業内容		
・ 缶体温度センサを新品交換いたしました。 ・ 水の使用量を測定いたしました。		
運転モード: デンタル		
①三段ラック、滅菌バッグ使用 900g ⇒ 水の使用量 730ml ②バスケット、滅菌バッグ使用 3400g ⇒ 水の使用量 800ml ③三段ラック、ステンレス固体 4500g ⇒ 水の使用量 870ml		
標準的な水の使用量であることが確認できました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶体温度センサ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 11 月 20 日

〒739-2504

広島県東広島市黒瀬町宗近柳園932-1

ご署名 アリス歯科クリニック印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証 上	責任技術者	生 作業者 幸
菊池	電話 0823 82-0321	
20/11/16	20/11/16	20/11/16
田	宅	