

点検・修理報告書

管理 No. 20144
発行日: 2020/6/10

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 5 月 21 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	藤岡歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島県廿日市地御前1-9-30	ご担当 様	
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090018	運転回数: 4212回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ドアロックエラー
エラー30 缶体真空異常

原因

ドアレバー部のねじのゆるみ
給水タンクの汚れ及び給水電磁ポンプ内の汚れ

処置、作業内容

ドアレバー部のねじの締め付け
給水タンクの清掃。給水電磁ポンプ内ストレーナの清掃

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

広島県廿日市地御前1-9-30

藤岡歯科医院

中 條 隆 徳

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/06/10 菊池	サービス '20/06/10 富田	サービス '20/06/10 安田