

点検・修理報告書

管理 No. 20716
発行日: 2021/1/18

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年1月12日			作業時間:	8 Hr
顧客名	はしもと歯科 様			TEL:	
所在地				ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年	月	日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐
装置情報	製造番号:	100191	運転回数:	回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー7 循環水圧低下異常が発生した。					
原因					
・このエラーは、循環ポンプの吐出出力が低下したときに発生するものです。循環ポンプの性能低下や、配管の詰まりなどの検出が目的です。今回は、仕上げ剤の泡だちが原因です。泡が多いと、吐出圧力が低下します。異常ではありません。					
処置、作業内容					
・多少泡が存在してもエラーが出ないように、設定を調整いたしました。					
特記事項					
・中段スプレーアームの回転が悪かったので、調整いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償	2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					

〒730-0846
広島市中区西川町12-3
はしもと歯科医院
院長 橋本 隆
TEL: 082-503-0808

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/01/18	21/01/18	21/01/18