

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	岡本歯科医院 様	製造番号	14060081	点検実施日	2015/9/9	し承認印	
	住所	広島県福山市松永町352-13	運転時間	1060 時間	点検実施者	(株)IHシバウラ		
	納入場所	同上	サービス形態	定期1	モリタ担当部署	広島モリタ 金藤様		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☐ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



運転確認

合格

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプ 42-7	2
※漏水防止 同定価面 7-70 1台分 修理済(合格)	

株式会社IHシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービス部
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

作業報告書 ①



株式会社IHIパワウ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6510 FAX 086-944-9030

顧客名	岡本歯科医院様				住所	広島県福山市松永町 352-13				
						TEL (084) 930-4730				
機種型式	WD-150	機番	14060081	運転状態	1060	回 Hr	修理区分	有償	無償	継続

症状

エラー3 機器内漏水

電源を入れたらエラーが発生使用できない。

原因

漏水センサー不具合(固定が悪くエラー発生)

- ・2015/9/9定期1年目点検の際、センサーの固定が悪く修正を実施。(両面テープ使用)
- ・翌日、修正両面テープが剥がれエラーが発生。

処置

・強力な両面テープにて、再度修正固定

・運転確認 剥がれは確認出来ませんでした。

最終確認項目

・翌9/11確認の為、歯科様電話確認。

・問題なく運転との回答。

交換部品名称

数量

本日は、左記内容の作業を行いました。
よろしく、ご査収下さい。
ご不明な点がございましたら、
左上の管理No.にてお問い合わせください。

後日、納品書・請求書を、送付いたします。

コメント

工番49992

無償対応

お客様ご署名

実施者

小野

① お客様控え