

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	名称	マツダ病院	製造番号	14070130	点検実施日	2021年6月15日	承認印	
	住所	広島県安芸郡府中町青崎南2-15	運転回数	975/4074	点検実施者	IHIアグリテック 安田		
	納入場所	歯科・口腔外科	サービス形態	スポットメンテナンス	モリタ担当部署	モリタ広島支店		

年 月 日

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☐
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック

インジケータ貼り付け



運転確認

含 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No. 210049
発行日：2021 年 6 月 15 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 6 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	マツダ株式会社 マツダ病院 歯科口腔外科 様		TEL： 082-565-5036
所在地	広島県安芸郡府中町青崎南2-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070130	運転回数： 4074
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 0 真空工程中真空エラー		
原因 ・ 真空ポンプ性能低下		
処置、作業内容		
・ 真空ポンプ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 7 月 1 日

ご署名

大下 雅枝



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者

種別
SS6

出張作業報告書 ②お客様控

コード 03315778	2021.07.01 *		整理 No	
お客様名 松田病院	受付No	637958	受付日	21 06 30
	品名	RC17_CLA	指定期間	21 7 1
ご住所 広島県安芸郡府中町青崎南2-15 082-565-5000 (〒735-8585)	機種	MICCLAVE		部コード
	製番	X1		6MJB
ご販売店様	保証	有		無
	注文書	販売日		20 07 01
(受付内容) I C オートクレーブ 代替え機入れ替え設置作業 I H I アグリテック様 同行サポート	出張日	21 7 1	出張開始時刻	12:00
	作業開始時刻	13:35	作業完了時刻	
	技術員	109918	技術員	
	技術員	山根	技術員	
(作業内容) 上記 入れ替え設置作業実施 致しました。 動作テスト正常確認致しました。	ご確認	修理時カウンター	ジャムカウンター	
	グループ	請求区分	契約区分	作業区分
	現象	原因		
	(備考)			
使用部品明細	品番	品名	数量	
コキット				
ハンダ				
毎度ありがとうございます。 ご依頼の作業につき上記の内容にて完了致しましたので ご報告します。 ※万一3ヶ月以内に同一症状の故障が発生した場合は、本書をご提示ください。 同一原因である場合は、無料にて修理させていただきます。				
修理についてのお問い合わせは右記にお願いします。		作業部門	シャープマーケティング ジャパン株式会社 広島技術センター 修理受付窓口：0570-006008	