

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様	名称	メープルヒル病院歯科	製造番号	14080167	点検実施日	2021年9月10日	ご承認印 
	住所	広島県大竹市玖波5-2-1	運転回数	1254	点検実施者	エムシーサービス(株)西村	
	納入場所		サービス形態	ベーシックサポートプラン	モリタ 担当部署	広島支店	

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態盛・漏れ
- 乾燥エア回路逆弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
- SDカードの書き込み確認

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ
- エアフィルター (メイン) のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定 (TOSI)

運転確認	
(合)	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
DPIチューブASSY	2
扉パッキン上	1
扉パッキン下	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1

株式会社IHI物流産業システム  
環境ソリューションBU サービスグループ  
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030