

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様 様	名称	竹内歯科医院	設備番号	13100039	点検実施日	2015年7月22日	ご承認印	敬竹 洋内
	住所	北九州市戸畑区沖台2-10-16	点検時間	1327回	点検実施者	エムシーサービス(株) 福岡SC 久岡		
	納入場所		サービス内容		モリタ担当部署	福岡 川崎様		

針芯(安全)

- ☒ 圧力計0点指示確認
- ドア
- ☒ フック突出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ボローナット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック突出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

台体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減速温度センサの汚れ
- ☒ 綱カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内スレーナーの破損・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の破損・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の破損・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生部)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他磨損割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空気防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの破損・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 浮・取っ手の破損・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基盤のコネクター抜き確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基礎傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの破損・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのみ取り換え・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ミニマルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HISHIバウラ

機械事業本部営業課 基本サービスG
〒704-8122岡山県岡山市南区西大寺新地170-6
TEL 086-944-5522 FAX 086-942-9030