



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170番1

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

シバウラ用

お客様	名称 いと森の歯科室	製造番号 100183	ご確認 原田
	住所 福岡県糸島郡志摩町久家1193-1	納入検査実施日 2016. 11. 28	
		納入検査実施者 エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	レ	ハンドル開閉検出確認	電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		レ	電源スイッチの作動状態
	レ	ハンドルキズ・汚れ		レ	SDカードの挿入・取外性
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	レ	滅菌温度センサの汚れ		レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	レ	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	レ	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	レ	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		レ	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの内部汚れ		レ	キズ・汚れ
	レ	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		レ	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		レ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	レ	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	レ	B&Dテスト実施
排水タンク	レ	タンク内に汚れはないか		レ	リークチェックテスト
	レ	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		レ	0点調整
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	レ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	レ	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		レ	運転・お手入れ方法の説明
				レ	装置内運転時異音

特記事項