

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称	竹内歯科医院	製造番号	13100039	点検実施	2017年4月12日	ご承認印	
	住所	北九州市戸畑区沖台2-10-16	運転時間	1243	点検実施	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
ドア	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒	フック取付け状態・動作確認
☒	フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット動作確認
☒	ドアロックユニット動作確認
☒	蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒	滅菌温度センサの汚れ
☒	網カゴの破損・汚れ
☒	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒	フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
☒	シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
☒	給気弁の作動状態・漏れ
☒	排蒸弁の作動状態・漏れ
☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ストレーナーの汚れ
☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒	安全弁(滅菌室)の漏れ
☒	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒	ダンプナーの漏れ・溶接割れ
☒	大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
☒	ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒	ソケット他溶接割れ・漏れ
☒	フランジパッキン漏れ
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ
☒	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
☒	電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
☒	逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真空到達度

給水タンク

☒	給水タンクの損傷・漏れ
☒	下部給水弁の漏れ
☒	蓋・取っ手の損傷・割れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒	タンクの汚れ・漏れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒	各基板のコネクター緩み確認
☒	端子の緩み・コネクターの接続確認
☒	配線の変色・損傷有無・結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒	運転プログラムの確認
☒	入力・出力確認
☒	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

☒	B&Dテスト実施
☒	ケミカルインジケータによる判定
☐	
☒	リークチェック
☐	キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

運転確認

良好

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6526 FAX 086-942-9030