



株式会社IHIシバタ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-10

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレープ IC Clave 設置報告書

モリタ用

お客様	名称	あがわ薬料 様	製造番号	100227	ご確認	N.M. B.安
	住所	福岡県糟屋郡新宮町伏見三丁目831-4	納入検査実施日	2017.3.28		
			納入検査実施者	若井		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	○	ハンドル開閉検出確認	電装系	○	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	○	ドアロックユニット作動確認		○	ディスプレイの色あせ・表示確認
	○	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		○	電源スイッチの作動状態
	○	ハンドルキズ・汚れ		○	SDカードの挿入・取外性
缶体	○	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		○	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	○	滅菌温度センサの汚れ		○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	○	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	○	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	○	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		○	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	○	給水タンクの内部汚れ		○	キズ・汚れ
	○	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	○	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		○	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	性能評価	○	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	○	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		○	B&Dテスト実施
排水タンク	○	タンク内に汚れはないか	その他	○	リークチェックテスト
	○	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		○	0点調整
	○	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		○	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	○	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		○	運転・お手入れ方法の説明
				○	装置内運転時異音

特記事項

新品入替交換

BMS-Test [STEAM]

「クラスBオートクレーブ IC Clave」 自主回収作業内容確認書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 環境機器営業

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030

お客様 おかわ 南科 様住所 福岡県糟屋郡新宮町大字三代 831-4作業完了日 2017年3月28日機械機番 100227

平素より、弊社製品について格別のご愛顧を賜り、厚く御礼を申し上げます。
 この度、弊社が製造販売している「クラスBオートクレーブ IC Clave」にて、ヒーターの制御
 部品・筐体の溶接に不備が見られたため、以下の内容で作業を実施させて頂きました。
 お客様には多大なるご迷惑をおかけ致しましたこと深くお詫び申し上げます。
 再発防止に向け、品質管理体制の一層の強化に努めてまいりますので、今後とも、何卒、
 ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

機械返却後、1年間の修理保証をさせていただきます。

- ☒ 1. トライアック(缶体ヒーター制御用)の交換をおこないました。
- ☒ 2. 本体溶接部分の強化をおこないました。
- ☒ 3. 水位センサーの交換をおこないました。
- ☒ 4. 各種点検作業・動作確認をおこないました。
- ☒ 5. その他()

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

上記内容を確認しました。

確認日: 2017年 3 月 28 日

ご署名

小川 忠宏

本作業にて知れた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIシバウラ