

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書




株式会社IHシバウラ

機破事業本部 営業サービス課

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

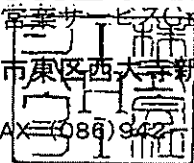

お客様様	名称	白金いっき歯科 様	製造番号	100208	ご確認 済
	住所 TEL		納入日	2017.4.19	
	福岡市中央区白金1-6-14				
モリタ・営業所・担当TEL 担当 株式会社モリタ福岡支店 塚田 様			納入検査・会社・実施者 エムシーサービス㈱ 福岡SC 横山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ・60HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量
TOSI	1
電源 204V	

(株)IHシバウラ



株式会社IHI

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

(株)IHI 用

お客様	名称	白金いっき歯科様	製造番号	100228	ご確認	
	住所	福岡市中央区白金1-6-14	納入検査実施日	2017.12.19		
			納入検査実施者	エムシーサービス㈱ 福岡SC 横山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い	制御	✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓			✓	装置内運転時異音

特記事項