

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 779078

お客様	名称	むらとみ歯科医院	製造番号	100220	確認	
	住所・TEL	長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 イオンタウン長与	納入日	2017. 5. 22		
	モリタ・営業所・担当TEL 担当 株式会社モリタ 長崎営業所 三留 様 095-849-1620	納入検査・会社・実施者 エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡				

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
 ア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
 洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
 給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	—	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
 装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量



株式会社HINIBAWA

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

シバウ用

お客様	名称	むらとみ歯科医院	製造番号	700251	ご確認	
	住所	長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-1-1 イオンタウン長与	納入検査実施日	2017. 5. 22		
			納入検査実施者	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ド パ ッ キン	✓	ハンドル開閉検出確認	電 装 系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶 体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外 装 ・ 設 置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給 水 タ ン ク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制 御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無い		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	性 能 評 価	✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	B&Dテスト実施
排 水 タ ン ク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	そ の 他	✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
ス ペ ース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項