



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-1

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



## クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

|     |          |              |                     |             |     |       |
|-----|----------|--------------|---------------------|-------------|-----|-------|
| お客様 | 名称       | よした産科クリニック 様 | 製造番号                | 100273      | ご確認 | 吉田 雅則 |
|     | 住所       | 福岡市南区長住4-1-4 | 納入検査実施日             | 2017. 8. 21 |     |       |
|     | モリタ 富雄 様 | 納入検査実施者      | エムシーサービス(株) 福岡SC 横山 |             |     |       |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目    | 判定 | 検査項目                   |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------|
| ドア・パッキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ      |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認        |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態            |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性           |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              | 外装・設置 | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ     |
|         | ✓  | 棚 1、トレイ 3キズ・汚れ                                              |       | △  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。  |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  | 制御    | ✓  | キズ・汚れ                  |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷      |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い                            |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)  |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認       |
| 排水タンク   | ✓  | LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施               |
|         | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 |       | ✓  | リークチェックテスト             |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |       | ✓  | 0点調整                   |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付    |
| スペース    | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと | その他   | △  | 運転・お手入れ方法の説明           |
|         |    |                                                             |       | ✓  | 装置内運転時異音               |

## 特記事項

△1～滅菌給水スペース下部パネルにゆがみ

△2～取設等はモリタ 様にて完了