

作業報告書

依頼者	たがみ歯科医院 様		ご承認	[サイン]	
住所	長崎市田上2-2-8		依頼	様	
TEL	095-827-1141		機種	WD-150	
機種型式	WD-150		号機	388	
完了	継続	有料	無料	製番	14060082
取扱業者名	様		ご担当者	様	

作業日 20 11 年 9 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守期間	3 CMC	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

ハモ

特記事項

請託: IHI システム

①管理No.	789113
②作業日	20 11 年 9 月 24 日
③Uコード	09 5 8 2 7 1 4 4 7
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	14 0 6 0 0 8 2
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 5 0
⑧故障コード	62 - 202 - 7
⑨実施SC	616
⑩技術者	37
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

ご依頼内容・現象

熱水消毒中に異音がする(??)

原因 現象の特定 および 原因の特定は出社したため、洗浄ポンプ、洗浄回路、薬剤仕上剤の投入量、水量(給水量)、温度上昇具合のチェック等を行いました。

処置・洗浄ポンプ(ハード樹脂→メタル)洗浄回路ホース交換作業。組付け後動作漏れチェック。薬剤仕上剤投入量チェック(測定) 仕上剤20ml→75ml。給水量チェック。最終すぎ(熱水消毒)にて消毒、異音有無、動作チェック(温度上昇チェック) 80℃プログラム、90℃プログラム実施にて動作確認。引渡し・説明実施。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

経過様子見守り下さい

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 二番報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

(シワシワ)	洗浄ポンプ(メタル)	1		
"	洗浄回路ホース	1		

1	基本・据付・点検・性検	(見取書No.)	
2	技術料	4 H × 1 名 × 7,500 円	30,000
3	派遣料	往復410km × 1 名 × 100 円	41,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			9,460

サービスセンター	北九州	実施者	久岡
TEL	-		

部署受	入力	検印	納品票
[印]	[印]	[印]	[印]

料 金 内 訳

⑬A	部品代	
⑭B	技術料等	83,460
⑮		
⑯	税別合計金額	83,460
B	消費税	6,676

ご請求金額 ※ 90,136

納品書No. 842