

名称	たがし歯科医院			様	ご承認印
住所	長崎市田上2-2-8				川中
TEL	095-827-1447	署名			
機種名	タッチディスプレイ79-			メーカー	ELP (IHI) 株式会社
型式	WD-150 (号機)			製番	14060082
完了	継続	有料	無料	運送回数	35 (2290) 回

- ・ドアがバタンと倒れてくる
- ・上段ラックのゴムが外れる

- ・ドアワイヤー破断の為
- ・受けゴム劣化の為と考えられます。

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了、異常なし

- ・ドアフュー-交換, グリス塗布, 開閉テスト
- ・上段スラック受けゴム交換, インシロックバンドに2
締付け固定 (定期的に交換が必要になる可能性
あります。(インシロックバンドが熱で伸びる為))
- ・90℃乾燥あり仕上りありにて動作, 漏水チェック。

①管理 No. 807664

②作業日 20 18.00.06

③Uコード 0958271447

④⑤機種コード 1.1 - 72

⑥製造 No. 14060082

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード

 -

 -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行店接

 ,

 ,

⑫原因・処理

 -

 -

 - 2

鈉晶變 Kc