

点検・修理報告書

管理 No. 20180967

発行日: 2019 年 3 月 8 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 3 月 8 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	川上歯科クリニック 様		TEL:
所在地	福岡県福岡市博多区下臼井778-1 福岡空港第3ターミナルビル2F		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 福岡支店		ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 4 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 100128	運転回数: 755	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 乾燥ヒーター異常 (No. 18)			
原因 HEPAフィルターの目詰まり			
処置、作業内容 HEPAフィルターを新品に交換			
特記事項 洗剤コネクタが緩かったため、仕上剤コネクタと共に新品に交換 (中継コネクタ仕様) ワイヤー改修チェックリストに沿って改修実施 SDカード基板にコーティング			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	HEPAフィルター		1		
2	洗剤ジャックASSY		1		
3	仕上剤ジャックASSY		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			川上歯科クリニック		
			合計 院長 川上 義 貴		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒812-0003 福岡県福岡市博多区大字下臼井116-1
福岡空港国内線旅客ターミナルビル2F
TEL 092-626-1715
FAX 092-626-1716

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



責任技術者	作業者
元 19.3.18	日 19/03/08 高