

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	うえむら歯科医院	製造番号	100369	ご確認	他
	住所	沖縄県宜野湾市字我如古380-1	納入日	2019年5月9日		
			納入検査実施者	(株)IHIアグリテック 小山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	⌒	開閉動作確認	外装・設置	⌒	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	⌒	ドアパッキンキズ・汚れ点検		⌒	アジャスタフットの緩み・設置状態
	⌒	ドアロックユニット作動確認		⌒	キズ・汚れ
	⌒	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		⌒	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	⌒	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	⌒	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	⌒	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	⌒	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	⌒	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		⌒	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	⌒	洗剤投入量の確認		⌒	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	⌒	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	⌒	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	⌒	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	⌒	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	その他	⌒	周波数と設置ICWの一致
	⌒	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		⌒	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	⌒	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		⌒	運転・お手入れ方法の説明
	⌒	給湯温度(45～50℃)		⌒	装置内運転時異音・振動
電装系	⌒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良 トシ	
	⌒	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	⌒	電源スイッチの作動状態			
	⌒	SDカードの挿入・取外性			
	⌒	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	⌒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

お湯1 120秒
 お湯2 120秒

加温限度時間 500秒