

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	せがし歯科(脊川歯科医院)	製造番号	100503	ご確認
	住所	長崎市桜町6-10-3F	納入日	2020. 12. 9	
			納入検査実施者	エムシーサービス㈱ 北九州SC 久岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態			
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	ローラーポンプの動作確認		✓	ラック仕様切替(ハンドピースラック・標準ラック)
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	有(無)	温水使用切換
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給湯温度(45~50℃)		—	運転・お手入れ方法の説明
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他	✓	装置内運転時異音・振動
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
運転検査結果			運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ

特記事項

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	せがわ歯科 (腎川歯科医院)	製造番号	300/03	ご確認	
	住所	長崎市桜町6-10-3F	納入検査実施日	2020. 12. 9		
			納入検査実施者	エムシーサービス㈱ 北九州SC 久岡		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項