

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIアグリテック用

お客様	名称	諸熊歯科医院	製造番号	14070122	点検実施日	2020.12.28	ご承認印
	住所	長崎市浜町3-20-2F	運転回数	2036	点検実施者	エムシーサービス㈱ 北九州SC 久岡	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン一式	1
洗剤ポンプチューブ	2
入口フィルター	1
HEPAフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業者用
[H]アグリテック用

お客様	名称	諸熊歯科医院	製造番号	14070150	点検実施日	2020. 12. 28	ご承認印
	住所	長崎市浜町3-20-2F	運転回数	1988 (917)	点検実施者	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - ☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
 - ☒ フック取り付け状態・動作確認
 - ☒ フック・バネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセツ増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ
 - ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

每体

- | | |
|---|----------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 滅菌温度センサの汚れ |
| ✓ | 網カゴの破損、汚れ |
| ✓ | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ |

配管系

- | | |
|---|-----------------------|
| ✓ | フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ |
| ✓ | シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ |
| ✓ | 給気弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 排蒸弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ |
| ✓ | 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁) |
| ✓ | ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁) |
| ✓ | ストレーナーの汚れ |
| ✓ | 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損 |
| ✓ | 安全弁(滅菌室)の漏れ |
| ✓ | 安全弁(蒸気発生器)の漏れ |
| ✓ | ダンプナーの漏れ・溶接割れ |
| ✓ | 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ |
| ✓ | ラジエーターの取り付け状態・漏れ |

蒸氣發生器

- | | |
|---|--------------------|
| ✓ | ソケット他溶接割れ・漏れ |
| ✓ | フランジパッキン漏れ |
| ✓ | ヒーター取り付け状態・漏れ |
| ✓ | 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態 |
| ✓ | 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ |
| ✓ | 逆支弁の作動状態・漏れ |

真空ポンプ

- | | |
|---|------------|
| ✓ | 水漏れ・異常音の確認 |
| ✓ | 真空到達度 |

給水タンク

- | | |
|---|------------------|
| √ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| √ | 下部給水弁の漏れ |
| √ | 蓋・取っ手の損傷・割れ |
| √ | フロートスイッチの作動状態・汚れ |

排水タンク

- | | |
|---|------------------|
| V | タンクの汚れ・漏れ |
| V | フロートスイッチの作動状態・汚れ |

電装系

- | | |
|---|-------------------------|
| ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| ✓ | 行程表示LEDの点灯 |
| ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| ✓ | 各基板のコネクター緩み確認 |
| ✓ | 端子の緩み・コネクターの接続確認 |
| ✓ | 配線の変色・損傷有無・結束状態 |
| ✓ | 圧力センサーの取付け状態・入力確認 |
| ✓ | ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥) |

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 本体の水平確認・基準傾き内 |
| ✓ | アジャスタフットの緩み・設置状態 |
| ✓ | キズ・汚れ |
| ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制錘

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 運転プログラムの確認 |
| ✓ | 入力・出力確認 |
| ✓ | 試運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

消耗品

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ | ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ |
| ✓ | エアフィルターのつまり、汚れ |

性能評価

- | | |
|---|---------------------|
| ✓ | 日&Dテスト実施 |
| ✓ | ケミカルインジケータによる判定 |
| ✓ | リークチェック |
| ／ | キャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

運転確認
☒ 合 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ナレ	

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030